

# CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL RESPIRADOR EN ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA\*

|                                                                                                           | N95 de cara completa (FFR) | N95 quirúrgico de cara completa (FFR) | Purificador de aire forzado con máscara de ajuste holgado (PAPR) | Elastomérico |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cumple con OSHA 1910.134 (estándar sobre protección respiratoria)                                         | X                          | X                                     | X                                                                | X            |
| Requiere evaluación del riesgo                                                                            | X                          | X                                     | X                                                                | X            |
| Requiere capacitación en el uso correcto                                                                  | X                          | X                                     | X                                                                | X            |
| Requiere prueba de ajuste                                                                                 | X                          | X                                     |                                                                  | X            |
| Se puede usar con campos estériles                                                                        |                            | X                                     | ? <sup>†</sup>                                                   |              |
| Se puede usar en procedimientos de alto riesgo que generen aerosoles (podrían requerirse EPP adicionales) |                            | X                                     | X                                                                | X            |
| Se puede usar con vello facial (que entre en contacto con la superficie de sellado)                       |                            |                                       | X                                                                |              |
| Diseñado para volver a usarse (se puede limpiar y mantener)                                               |                            |                                       | X                                                                | X            |
| Se puede usar para medidas de precaución de transmisión aérea                                             | X                          | X                                     | X                                                                | X            |

\*Estas consideraciones se deben entender en términos de uso general. Manténgase informado a medida que se actualicen las directrices de salud pública

<sup>†</sup>No hay evidencia suficiente para respaldar su uso seguro.

Fuente: OSHA/NIOSH Hospital Respiratory Protection Program Toolkit



Centers for Disease Control and Prevention  
National Institute for Occupational Safety and Health